

Vejledning til Digora

Inden røntgenbilledet vedhæftes til onlinehenvisningen skal det først eksporteres fra røntgenprogrammet:

- 1) Vælg og åbn det billede du vil eksportere (dobbeltklik på billedet)
- 2) Tryk "F12" eller klik på "Billede" i den øverste menulinie og vælg "Eksporter"
- 3) Øverste boks "Gem i" vælg "skrivebord" (ved at trykke på trekanten)
- 4) Næstnederste boks "Filnavn" skriv det navn du vil give billedet
- 5) Nederste boks "Filtype" vælg "JPEG" (ved at trykke på trekanten)
- 6) Tryk "Gem"

Billedet skulle nu ligge på skrivebordet og kan vedhæftes onlinehenvisningen. (er du i tvivl hvordan, så se herunder)

- 1) Tryk på knappen "Gennemse"
- 2) Tryk på den lille pil øverst i boksen
- 3) Vælg "Skrivebord"
- 4) Find billedet du lige har lagt på skrivebordet og dobbeltklik på det.

Billedet er nu indsat i online henvisningen og du kan fortsætte med indtastningen.