

## Vejledning til Dimaxis

**Inden røntgenbilledet vedhæftes til onlinehenvisningen skal det først eksporteres fra røntgenprogrammet:**

- 1) Dobbeltklik på det billede du vil eksportere
- 2) Tryk på ikonet med en diskette eller vælg ”**Billede**” -> eksportér i den øverste menu
- 3) Klik på knappen ”**søge**” til højre for den firkantede boks
- 4) Markér/vælg ”**Skrivebord**” så den er ”blå” og tryk ”**OK**”
- 5) Vælg format ”**JPG**”
- 6) Tryk ”**OK**”

**Billedet skulle nu ligge på skrivebordet og kan vedhæftes onlinehenvisningen.(er du i tvivl hvordan, så se herunder)**

- 1) Tryk på knappen ”**Gennemse**”
- 2) Tryk på den lille pil øverst i boksen
- 3) Vælg ”**Skrivebord**”
- 4) Find billedet du lige har lagt på skrivebordet og dobbeltklik på det.

**Billedet er nu indsat i online henvisningen og du kan fortsætte med indtastningen**