

## Vejledning til Schick

**Inden røntgenbilledet vedhæftes til onlinehenvisningen skal det først eksporteres fra røntgenprogrammet:**

- 1) Marker/klik på det billede du vil eksportere (der ses en rød ring omkring)
- 2) Klik på **"xray/image"** i den øverste menulinie og vælg **"export"**
- 3) Øverste boks **"Gem i"** vælg **"skrivebord"** (ved at trykke på trekanten)
- 4) Næstnederste boks **"Filnavn"** skriv det navn du vil give billedet
- 5) Nederste boks **"Filtype"** vælg **"JPEG FORMAT"** (ved at trykke på trekanten)
- 6) Tryk **"Gem"**

**Billedet skulle nu ligge på skrivebordet og kan vedhæftes onlinehenvisningen. (er du i tvivl hvordan, så se herunder)**

- 1) Tryk på knappen **"gennemse"**
- 2) Tryk på den lille pil øverst i boksen
- 3) Vælg **"skrivebord"**
- 4) Find billedet du lige har lagt på skrivebordet og dobbeltklik på det.

**Billedet er nu indsat i online henvisningen og du kan fortsætte med indtastningen**