

Vejledning til Sidexis

Inden røntgenbilledet vedhæftes til onlinehenvisningen skal det først eksporteres fra røntgenprogrammet:

- 1) Vælg og åbn det billede du vil eksportere
- 2) Klik på **"Image"** i den øverste menulinie og vælg **"Export"**
- 3) Øverste boks **"Gem i"** vælg **"Skrivebord"** (ved at trykke på trekanten)
- 4) Næstnederste boks **"Filnavn"** skriv det navn du vil give billedet
- 5) Nederste boks **"Filtype"** vælg **"JPEG File interchange format"** (ved at trykke på trekanten)
- 6) Tryk **"Gem"**

Billedet skulle nu ligge på skrivebordet og kan vedhæftes onlinehenvisningen. (er du i tvivl hvordan, så se herunder)

- 1) Tryk på knappen **"Gennemse"**
- 2) Tryk på den lille pil øverst i boksen
- 3) Vælg **"Skrivebord"**
- 4) Find billedet du lige har lagt på skrivebordet og dobbeltklik på det.

Billedet er nu indsat i online henvisningen og du kan fortsætte med indtastningen.